



NUROTRON  
诺尔康

面向人工耳蜗植入者的重要信息

版本号：1

适用国家/地区：中国



**植入者进行下列医学治疗前，请告知医生以下的医学治疗警告事项：**

**电外科手术：**切勿使用单极电外科器械，可以使用双极电外科器械，但是，烧灼末端不能与植入体接触，应该要与刺激器和电极区域保持至少 3cm 的距离。

**透热疗法：**不要使用电磁辐射的治疗或透热疗法，使用超声波的超声波透热疗法可用于颈部及颈部以下。

**神经刺激：**不要直接在耳蜗植入体上面使用神经刺激。

**电休克的治疗：**任何情况都不要对耳蜗植入者使用电休克治疗。

**电离辐射疗法：**不要直接在植入体所在头部使用此疗法；电离辐射安全剂量为 100Gy。

**核磁共振：**CS-30A 系列为核磁共振特定条件安全，请参照《CS-30A 说明书-磁共振安全指南》。

钴治疗、正电子断层扫描、经颅诊断超声、线性加速方法、高能电场和除颤器对植入体的影响未知。